

MODELLO 3304G - ANELLO PER DIVARICAZIONE

Consigliato per le seguenti procedure:

- Chirurgia vaginale, plastiche anteriori e posteriori, cistocele, rettocele, enterocele
- Sling
- Isterectomia
- Colpo-istero sospensioni

I VANTAGGI DEL SISTEMA DI DIVARICAZIONE AUTOSTATICA LONE STAR

- Varietà delle forme degli anelli per soddisfare le necessità delle diverse procedure chirurgiche
- Un design studiato per una agevole applicazione dell'anello sul campo chirurgico
- Fessure periferiche per un facile inserimento dei retrattori elastici e punti di sutura
- Semplice regolazione della tensione e del posizionamento dei retrattori elastici, durante la procedura chirurgica
- Confezione sterile con una pratica apertura a strappo

Può essere usato con qualsiasi tipo di retrattore elastico della serie Lone Star Retractor System™

L'anello per divaricazione articolo 3304G è disponibile come una parte del Sistema di Divaricazione Autostatica Lone Star: **“Anelli per Divaricazione e Retrattori Elastici”**

COME USARE IL SISTEMA LONE STAR

1. Posizionare l'anello per divaricazione sterile sopra il campo chirurgico
2. La forma dell'anello per divaricazione può essere adattata all'anatomia del campo chirurgico
3. Stabilizzare l'anello, attraverso l'inserimento dei primi due retrattori elastici posizionandoli su due fessure diametralmente opposte
4. Divaricare il margine dell' incisione chirurgica con il retrattore elastico ed allungare l'elastico stesso fino all' estensione desiderata. Va inserito quindi, in una fessura dell'anello per bloccarlo
5. Tenere l'anello finché il retrattore elastico opposto non è stato piazzato. Applicare uguale tensione al secondo retrattore elastico in modo che l'anello rimanga centrato sopra il campo chirurgico
6. Altri retrattori elastici possono essere aggiunti in gruppi di due su parti opposte intorno alla zona d'incisione in modo da fornire l'esposizione necessaria
7. I retrattori elastici possono essere mossi o riposizionati, come la procedura chirurgica richiede
8. Lone Star Medical Products offre una varietà di retrattori elastici adatti alla esposizione dei tessuti superficiali e profondi

SCHEDA TECNICA MOD. 3304G ANELLO PER DIVARICAZIONE

Codice e confezione cod. 3304G, n° 1 pz. in blister sterile con Tyvek termosaldato ed apertura a strappo

Imballo, Iscrizioni Blister sterile, contenuto in un box facilmente impilabile ed identificabile, comprensivo di istruzioni per l'uso plurilingue ed etichetta conforme alla normativa CEE 93/42

Marchio commerciale Lone Star Retractor System™

Produttore Cooper Surgical Inc. 95 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611 - USA <http://www.coopersurgical.com>

Composizione, Tossicità Resina "NORYL®" per uso "Medical Grade", brevetto General Electric: Atossico

Non contiene lattice

Smaltimento Può essere incenerito senza rischio di residui dannosi

Dimensioni Diametro: 32,5 cm. x 18,3cm. - Peso: 100 gr.

Modello Articolato, con due cerniere filettate, una su ogni lato

Retrattori consigliati Tutti i retrattori elastici monouso della serie Lone Star Retractor System™ possono essere usati con questo anello per divaricazione

Sterilizzazione Questo prodotto è sterilizzato dal fabbricante, con un ciclo ad ossido di etilene

Non può essere risterilizzato in alcun modo

Validità alla consegna Almeno $\frac{3}{4}$ dai termini della scadenza

Marchio CE CE 2797 certificato n° 69386, rilasciato il 30 agosto 2002.

Classificazione secondo le Direttive 93/42/CE - Questo prodotto appartiene alla classe dei dispositivi medici di classe I

CND K01020106

NUMERO REPERTORIO 1084926

Brevetti Internazionali 4,274,398 - 4,350,151 - 4,430,991 - 4,434,791 - 4,950,222 - 5,728,041 - 5,769,783 - 5,785,649 - 5,899,853 - 5,964,697 - 5,964,698 - 6,117,072 - 6,190,312